

**medi**



## Инструкция по применению и уходу за изделием



покупать онлайн удобно  
[www.medi-salon.ru](http://www.medi-salon.ru)

medi. Почувствуйте себя лучше.



## medi compression\*

### Умная и эффективная продукция

Более 60 лет исследований и совместной творческой работы врачей, инженеров, технологов и дизайнеров компании medi по совершенствованию компрессионных изделий позволили создать и внедрить в производство комплекс уникальных инновационных технологий, объединенных под товарным знаком компании – medi compression. Медицинские компрессионные изделия, производимые по этим технологиям, гарантируют правильное с медицинской точки зрения распределение давления и исключительные потребительские свойства.

medi compression – ключ к успеху в компрессионном лечении, к хорошему самочувствию в повседневной жизни и спорте. Сделано в Германии.

## mediven struva 23\*\*

### ГОСПИТАЛЬНЫЙ КОМПРЕССИОННЫЙ ТРИКОТАЖ

#### Назначение и показания

Гольфы, чулки, чулки с застёжкой на талии компрессионные mediven struva 23 с убывающим градиентом давления предназначены для компрессионного лечения сразу после флебосклерозирования и оперативных вмешательств на венах нижних конечностей, для профилактики отеков и гематом. Компрессионный трикотаж mediven struva 23 используется также для профилактики венозных тромбозомических осложнений (ВТЭО) у пациентов с умеренной и высокой степенью риска ВТЭО:

- до, во время и после операции;
- при тромбозе глубоких вен в анамнезе;
- у пациентов с патологией вен нижних конечностей.

#### Противопоказания

Хронические облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей, когда регионарное систолическое давление на а. tibialis posterior ниже 80 мм рт. ст. Тяжелые формы диабетической полинейропатии и ангиопатии. Декомпенсированная сердечно-легочная недостаточность. Трофические язвы невензной этиологии. Острая инфекция мягких тканей. Септический флебит. Компания medi не несет ответственности за использование компрессионного трикотажа при наличии вышеперечисленных противопоказаний.

#### Рекомендации по надеванию mediven struva 23

Выверните гольфы или чулки наизнанку до той части, которая надевается на стопу. Наденьте изделие на стопу. Обратите внимание на правильность расположения пяточной части. Равномерно, не перекручивая, расправьте изделие по ноге. Убедитесь, что изделие не образует складок и не вызывает сдавливания. Обратите внимание на то, чтобы специальный индикатор на резинке чулок

был в форме квадрата. Если Вы чрезмерно растянули изделие вверх и специальный индикатор на резинке чулка вытянулся в прямоугольник, Вам следует опустить изделие вниз до уровня колена и снова расправить, не растягивая так сильно. Дополнительное вспомогательное приспособление medi Butler\*\* облегчает процесс надевания компрессионного трикотажа, экономит силы и время (см. рисунок в международной инструкции по использованию).

#### Рекомендации по уходу

Изделия белого цвета стирать при температуре 95 °С, изделия бежевого цвета стирать вручную или в стиральной машине в деликатном режиме при температуре воды 40 °С, используя моющие средства, не содержащие отбеливатель. Сушить в сухом проветриваемом месте. Стерилизация: необходимо упаковать изделие в соответствующий пакет из стерильных материалов. Рекомендуются следующие методы стерилизации: этилен оксид, гамма-излучение. Могут также использоваться другие методы стерилизации с температурой ниже 95 °С, такие как формальдегидный метод или метод газоразрядной плазмы. Внимание: температура выше 95 °С приводит к потере эластичности изделия, а следовательно и медицинского эффекта. По этой причине стерилизация в автоклаве не может быть использована, поскольку применяемая в автоклаве температура составляет 130 °С или 180 °С. Изделие не следует стерилизовать более 5 раз.

#### Рекомендации по хранению

Хранить в сухом месте при комнатной температуре вдали от прямых солнечных лучей и влаги. Срок годности – 60 месяцев от даты изготовления (дата окончания срока годности отмечена знаком песочных часов и цифрами на задней части шитого в изделие ярлыка: «год – месяц»). Изготовитель гарантирует сохранение компрессионных свойств изделия в течение 10 циклов «использование – стирка» (в пределах срока годности и при соблюдении рекомендаций, изложенных в инструкции по использованию). По истечении срока годности товар подлежит утилизации.

#### Особые указания

Никогда не подворачивайте верхний край изделия: это приводит к локальному повышению давления (так называемому эффекту жгута), ухудшению кровотока и неприятным ощущениям.

Если у Вас влажная кожа, используйте тальк, чтобы компрессионное изделие лучше скользило по коже. Будьте осторожны, если у Вас длинные ногти или если Вы носите кольца.

Чтобы избежать повреждений при надевании компрессионного трикотажа, целесообразно использовать резиновые перчатки.

Шершавая и ороговевшая кожа на пятках может быть причиной повреждения трикотажа, так как в процессе надевания пятка должна скользить через узкую часть изделия.

Пожалуйста, следите за тем, чтобы внутренняя поверхность Вашей обуви была в хорошем состоянии, так как ее дефекты могут привести к повреждению изделия. Компрессионный трикотаж medi устойчив к различным мазям, кремам и увлажнителям кожи, однако некоторые их комбинации со временем могут привести к снижению прочности изделия.

\* МЕДИ КОМПРЕШН  
\*\* МЕДИВЕН СТРУВА 23  
\*\*\* МЕДИ БАТЛЕР

Консультанты специализированных салонов дадут Вам рекомендации, как правильно надевать и снимать изделие, правильно ухаживать за ним. Пожалуйста, следуйте этим рекомендациям.

#### Свойства

**Компрессия:** 23 мм рт. ст. на уровне лодыжек.

**Цвета:** белый, бежевый.

**Размеры:** I–VII.

**Виды изделий:** гольфы, чулки с резинкой на силиконовой основе, чулки с застежкой на талии.

**Длина:** стандартная.

**Носок:** открытый.

**Стопа:** универсальная.

**Состав:** эластан, полиамид. Точное процентное содержание – см. нашитом в изделие ярлыке.

#### Рекомендации по подбору размера

Определяющим для выбора размера гольфов и чулок mediven struva 23 является измерение длины окружности голени над лодыжками (измерение b). Для подтверждения размера чулок необходимо также измерить: длину окружности голени, ниже подколенной складки на ширину 2 пальца пациента (измерение d) и длину окружности верхней трети бедра, на 5 см ниже промежности (измерение g). Шаблон для подбора размера mediven struva 23 в виде ленты с цветными делениями значительно облегчает эту процедуру.

#### Длина окружности

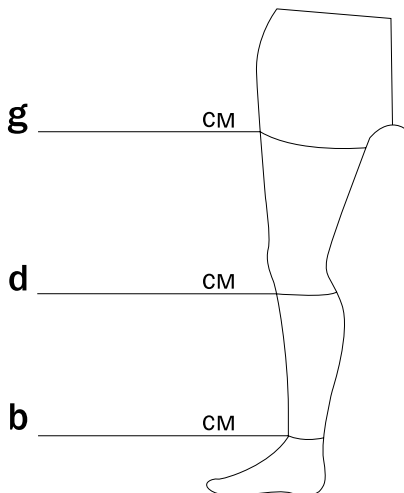


Таблица размеров для гольфов и чулок mediven struva 23

Размер	I	II	III	IV	V	VI	VII
Длина окружности, см							
Верхней трети бедра, g	42–54	49–58	50–62	54–66	58–70	62–74	66–78
Голени ниже подколенной складки на ширину 2 пальцев пациента, d	28–34	29–36	30–39	31–41	32–43	33–45	34–47
Голени над лодыжками, b	17–19	19–21	21–23	23–25	25–27	27–29	29–31
Цветовой код на пятке (для изделий белого цвета)	розовый	синий	желтый	красный	серый	зеленый	коричневый

#### Преимущества

- Точно выверенный медицинский профиль давления (давление распределяется следующим образом: 100 % на уровне лодыжек, 70 % на уровне верхней трети голени, 40 % на уровне верхней трети бедра).
- Цветовая кодировка позволяет быстро подобрать нужный размер.
- Пористая вязка обеспечивает нормальный температурный и водный баланс кожи.
- Отсутствие латекса (натурального каучука) и соответствие требованиям Oeko-Tex Standard 100 обеспечивают гипоаллергенность.
- Нескользащая резинка на силиконовой основе не позволяет чулкам сползать вниз.
- Специальный индикатор на резинке помогает правильно надеть чулок.
- Устойчивы к воздействию солнечных лучей, влаги и кремов.



СЛУЖБА ИНФОРМАЦИИ  
medi в России

☎ 8-800-250-39-37  
(бесплатный звонок по России)  
www.medirus.ru